

Set atele vacuum “Halley”

ME.BER

1. Descriere si componente

Setul de atele vacuum “Halley” este un set de atele pneumatice al carui scop este sa ajute in caz de raniri sau traumatisme.

Setul este alcatuit din trei atele vacuum de diferite dimensiuni, o geanta de transport si o pompa vacuum.

Fiecare atela este confectionata prin lipire, dotata cu o valva usor de accesat si cu o centura de imobilizare Velcro.

2. Trasaturi:

Denumire: “Halley”, set atele vacuum

Clasificare: Dispozitiv medical clasa I – Directiva 93/42/CEE

Referinta: UNI-EN 1865

Articol	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	Greutate (kg)
Geanta transport	820	150	290	0.5
Atela mare	1100	500	40	1.5
Atela medie	750	520	40	1.1
Atela mica	520	340	40	0.5

Pompa vacuum Lungime tub: 625 mm

3. Utilizare corespunzatoare / necorespunzatoare

Produsul este destinat utilizarii intr-un cadru medical sau particular, pentru imobilizarea oricarei parti a corpului, atunci cand patologia o permite.

Producatorul isi declina responsabilitatea in cazul folosirii produsului in urmatoarele conditii, considerate necorespunzatoare:

- Utilizarea de catre personal necalificat.
- Necunoasterea tehnicilor de imobilizare.
- Nerespectarea de catre operatori a regulilor de securitate.
- Folosirea dispozitivului in patologii incompatibile.
- Modificari neautorizate de catre Me.ber.
- Nerespectarea specificatiilor din prospect.

4. Instructiuni pentru operatori:

Produsul este destinat uzului profesional. Operatorii trebuie sa aiba experienta in folosirea tehnicilor de imobilizare. Trebuie de asemenea sa corespunda din punct de vedere al conditiei fizice, pentru a folosi produsul in conditii de maxima securitate pentru pacient.

5. Utilizare

Setul de atele vacuum poate fi folosit dupa verificarea integritatii componentelor. Pentru a avea aceasta siguranta, Me.ber efectueaza verificari stricte in timpul fabricatiei. Oricum, este recomandata o verificare de siguranta, dupa cum este indicat in schema urmatoare.

Descrierea testului	Rezultat pozitiv	Rezultat negativ
Verificati integritatea partilor setului		
Verificati integritatea partii de nylon		
Verificati capacitatea pompei de a crea vacuum		
Verificati functionarea valvelor		
Verificati centurile de imobilizare		

Instructiuni de utilizare

Pentru a aplica o atela vacuum

Pentru o utilizare perfecta a atelei este necesara interventia a cel putin 2 operatori. Unul mentine manual membrul afectat in pozitie nemiscata, iar celalalt aplica atela.

Alegeti atela cu o dimensiune potrivita pentru o imobilizare corecta a membrului afectat.

Atentie!

Folosirea incorecta a dispozitivului poate cauza ranirea pacientului.

Distribuiti uniform materialul din interiorul atelei.

Infasurati atela in jurul membrului care se doreste a fi imobilizat (valva trebuie plasata in afara, intr-o pozitie accesibila) si fixati-o cu centurile Velcro.

Conectati pompa de vid la valva atelei si actionati pompa, indepartand aerul din interior (valva este adusa in pozitie “deschis” prin rasucirea butonul in sens anti-orar) modeland atela in jurul membrului.

Dupa atingerea unei duritati suficiente pentru imobilizare, inchideti valva (rasuciti butonul in sens orar) si deconectati furtunul pompei.

Executati aceste operatii cu multa grija.

Atentie!

Crearea unui vacuum excesiv in atela sau manevrarea incorecta a centurilor Velcro pot rani pacientul.