




Mediplus Gulere cervicale reglabile pentru adulți și pediatrice

Instrucțiuni de folosire

Scopul utilizării

Acest produs are ca scop susținerea coloanei cervicale într-o poziție neutră în timpul transportului, în combinație cu alte dispozitive de imobilizare cervicală și a întregului corp (CSID-uri și FBSID-uri).

Sunt prevăzute cârlige pentru canule pentru fixarea liniilor suplimentare de oxigen.

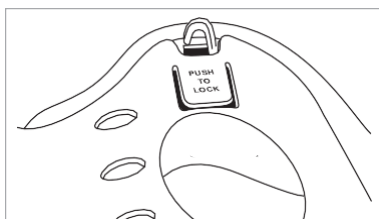

Avertismente


- Gulerele cervicale Mediplus trebuie utilizate numai de furnizorii de servicii medicale calificați.
- Utilizarea necorespunzătoare poate duce la vătămări sau invaliditate permanentă. Urmați întotdeauna protocolul local de imobilizare a coloanei vertebrale.
- Utilizați gulerul de dimensiunea corectă. Un guler supradimensionat poate supraextinde coloana cervicală a pacientului. Un guler subdimensionat poate să nu ofere o stabilitate adecvată.
- Nu ajustați gulerul Select sau Pedi-Select pe pacient.

Important

- Este imperativ ca pacientul să fie imobilizat corespunzător pentru a preveni orice mișcare a coloanei vertebrale.


Instrucțiuni de utilizare

1. Măsurați pacientul

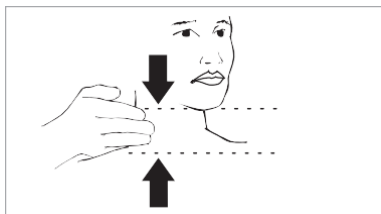


2. Potrivii dimensiunea gulerului după pacient:
Selectare: Alegeți din cele patru poziții pentru adulți.


Selectare pediatrică: Selectați din cele trei poziții pediatrică.

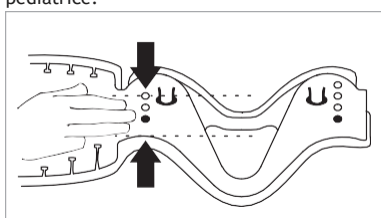

3. Reglați și blocați gulerul reglabil

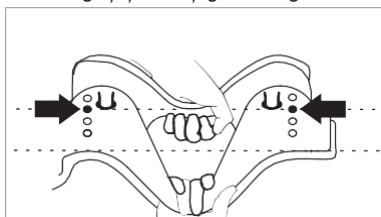

4. Blocați ambele părți apăsând cele două clapete de blocare.

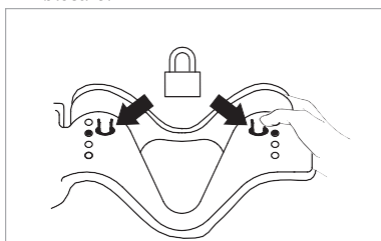

Producător:

Elde Medikal San. Tic. A.Ş. Dudullu OSB
San. Mah. 3 Cad. No: 5/35 Ümraniye
İstanbul
Tel. +90 216 660 00 74
Fax +90 216 660 00 75
www.eldemedical.com

Distribuit de:


Mediplus Medikal San. Tic.Ltd. Şti.
Dudullu OSB San. Mah. 3 Cad. No:
5/34 Ümraniye İstanbul
Tel. +90 216 660 00 74
Fax +90 216 660 00 75
www.mediplusmedikal.com
Nr. revizuire: 1888650
Data: 01.10.024

5. Aplicați gulerul menținând manual poziția neutră a capului



Așezați suportul pentru bărbie sub bărbie. Dacă este nevoie de o dimensiune diferită, îndepărtați, redimensionați și reaplicați gulerul.

Trageți strâns partea din spate a gulerului în timp ce țineți partea din față pe loc și apoi fixați.

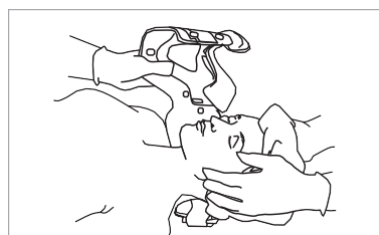

Pentru un pacient în decubit dorsal, glisați panoul din spate în spatele gâtului înainte de a pune suportul pentru bărbie.

Specificații tehnice

Nu depozitați gulerul în poziție pliată.
Depozitați în poziție plată.


Temperaturi de depozitare

-34 °C - 52 °C
(-30 °F - 125 °F)

Temperaturi de utilizare

-25 °C - 43 °C
(-13 °F - 110 °F)

Subsemnatul CIUHU BOGDAN CONSTANTIN,
traducător autorizat cu nr. 7319/2002 certific exactitatea traducerii cu textul
documentului, redactat în limba **engleză** și vizat de mine.

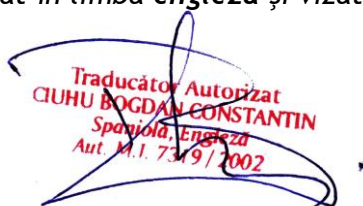

Traducător Autorizat
CIUHU BOGDAN CONSTANTIN
Spaniolă, Engleză
Aut. M.I. 7319/2002