

AH-05 Umidificator



- Denumire model: AH-05
Denumire produs: Umidificator
- Scop
Umidificarea gazelor respiratorii pentru a preveni iritarea tractului respirator din cauza gazelor uscate.
- Specificații
Capacitate: Nivel maxim al apei: 150 ml
Conexiune admisie: 9/16" UNF
Capac - Dop: Aluminiu
- Ieșire: Aluminiu
- Filtru: Aluminiu
Sticlă - Cupă: PC

● Instrucțiuni

1. Umpleți cupa umidificatorului cu apă sterilă până la nivelul specificat.
2. Atașați bine orificiul de admisie la debitmetru.
3. Conectați ieșirea la tubul de oxigen al pacientului.

● Atenție!

1. Apa sterilă din cupa umidificatorului trebuie schimbată zilnic.
2. Nu depășiți linia superioară a apei și nu lăsați apa să scadă sub linia inferioară.
3. Utilizați soluție de curățare neutră diluată sau lavetă cu apă curată atunci când curățați.
4. Nu utilizați detergent coroziv cu concentrație ridicată.

● Curățare și sterilizare

Curățarea trebuie urmată de dezinfectare sau sterilizare

1. Curățare: Folosiți apă curată și lavetă fără scame (aplicabil pentru toate piesele).
2. Dezinfectare: Se înmoaie în alcool izopropilic 70% timp de 10 minute (după curățare).
3. Sterilizare: Autoclavare la 100°C timp de 15 minute (după curățare și uscare). (aplicabil pentru toate piesele)

- Perioada de expirare: 2 ani (neutilizat)

WE THINK PRESSURE & FLOW

Eu, subsemnata Ligia – Maria COSTA, traducător-interpret autorizat de MINISTERUL JUSTIȚIEI numărul 22863 / 7.08.2017, certific exactitatea acestei traduceri în limba română cu înscrisul ORIGINAL / COPIE / FAX/PDF redactat în limba engleză care a fost vizat de mine.

Data 24.04.2025

