

## Mască Venturi reglabilă

### Cu tubulatură

#### Instrucțiuni de utilizare:

1. Alegeți dispozitivul de diluare corespunzător pentru concentrația de oxigen dorită, 24%-60%. Albastru 24% la 4 lpm, galben 28% la 4 lpm, alb 31% la 6 lpm, verde 35% la 8 lpm, roz 40% la 8 lpm, portocaliu 50% la 10 lpm și roșu 60% la 15 lpm.
2. Introduceți capătul mare al dispozitivului de diluare în tubul cutat conectat la mască.
3. Dacă trebuie administrată umidificare, fixați capacul de umidificare peste dispozitivul de diluare.
4. Conectați un capăt al tubulaturii de oxigen la admisia dispozitivului de diluare și celălalt capăt la sursa de oxigen.
5. Reglați astfel încât să fie egal cu nivelul ștampilat pe partea din față a dispozitivului de diluare pentru a asigura concentrația indicată.
6. Puneți masca conturată pe față. Reglați bare de aluminiu pentru o potrivire confortabilă. Puneți banda de prindere în jurul capului, ușor peste nivelul urechii. Trageți capetele benzii în poziția dorită de confort pentru a menține poziția măștii.

#### Atenție:

- De unică folosință. A se elimina după utilizare.
- A nu se utiliza dacă ambalajul este deschis sau deteriorat.
- A nu se depozita la temperaturi și umiditate extreme.
- A se depozita într-un loc răcoros și uscat.
- Asigurați-vă că toate conexiunile sunt sigure și că aerul circulă liber prin tubulatură.