



C-111

KIT ISOFIX MTR-120R2

Accesorii

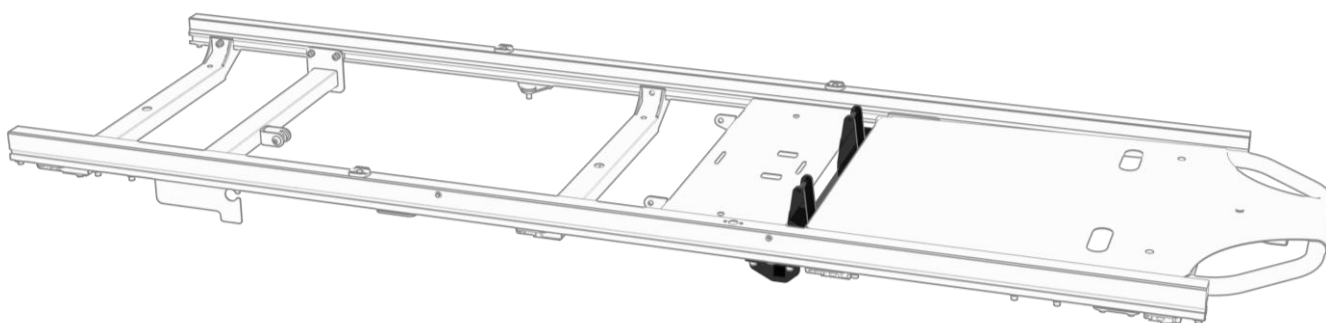

Dimensiunile produsului

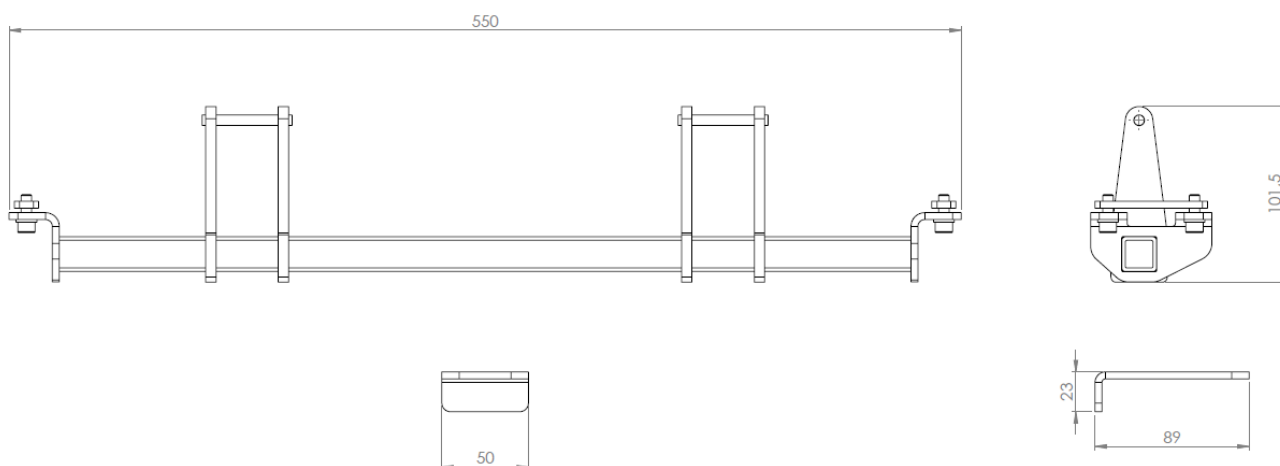


Descriere	Accesoriu pentru fixarea scaunului pentru copil
Greutate	1,1 Kg
Informatii de interes	Este compatibil cu scaunele prevazute cu sistem de fixare a partii superioare. Usor de instalat pe brancarda. Certificare 10G.
Recomandarea numarului de persoane necesare pentru a utiliza targa, atunci cand este un pacient pe aceasta	1 sau 2 persoane (2 persoane in situatia in care pacientul este supraponderal)
Sisteme de fixare compatibile/recomandate	MTR-120R2

Instalarea accesoriului pe brancarda

- **Componente**

Instalația are 3 componente. Corpul principal, sistemul de fixare superior și sistemul de fixare pe șină. Diagrama de mai jos arată amplasarea pe branhie:

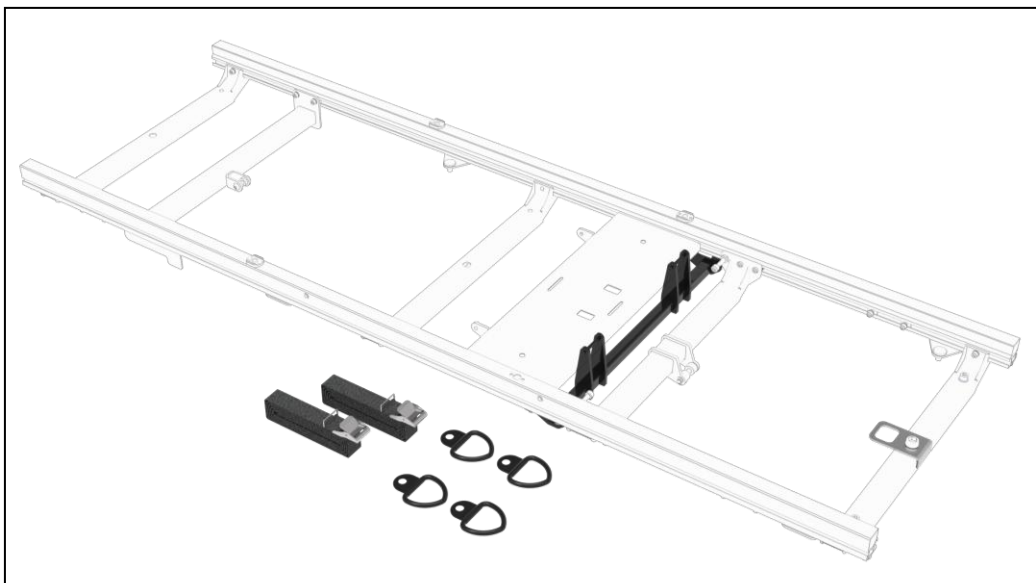

- **Poziționare pe brancarda MTR-120R2**

Corpul principal este reprezentat de un corp robust sudat, care este fixat pe profilul din partea inferioară a brancardei.




Sistemul de fixare este la fel ca la celelalte mecanisme care compun brancarda. Corpul principal al sistemului ISOFIX este fixat cu surburi de profilul brancardei cu ajutorul unei plăci special proiectate.

Suruburile necesare fixării sunt incluse.

**KARTSANA**


Life-moving innovation

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI C-111 KIT ISOFIX PENTRU MTR-120R2

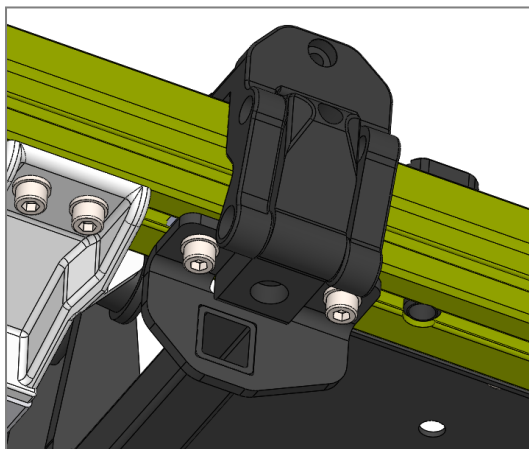


Datorita barelor laterale ale brancardei, centrarea accesoriului este foarte usoara.

Mai jos veți găsi măsurătorile pentru instalarea accesoriului:

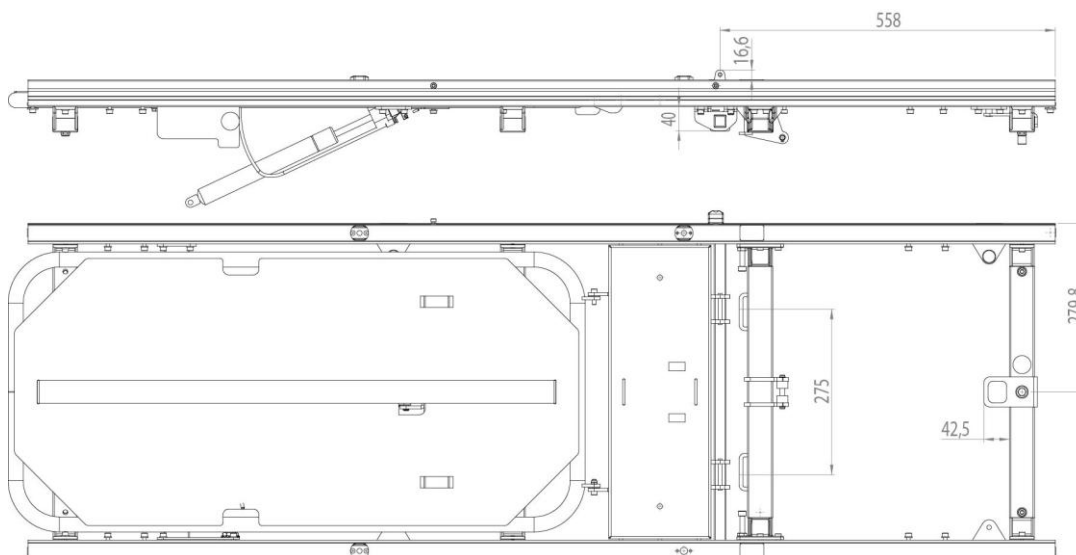

În cazul șinei, înșurubați ancorele în orificiile indicate și treceți cablurile prin acestea.

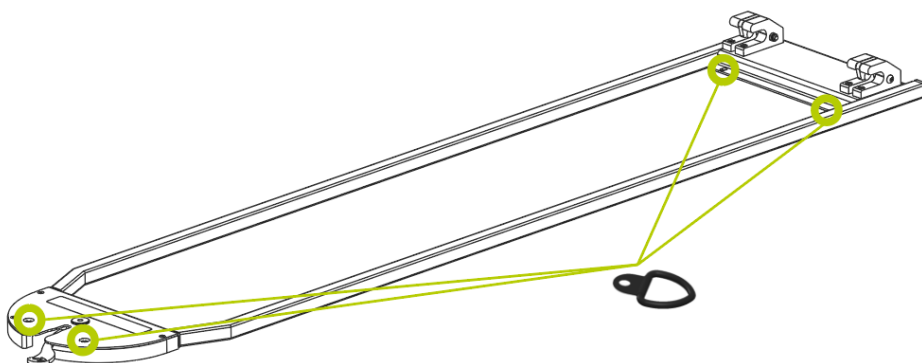


Utilizarea produsului

Cele doua puncte pentru fixarea produsului sunt aratate in diagrama de mai jos:



Înainte de a conduce, asigurați-vă că targa este bine ancorată pe ambulanță prin fixarea brațelor pe MTR-120R2 cu șina. Strângeți slingul la marcajul indicat.

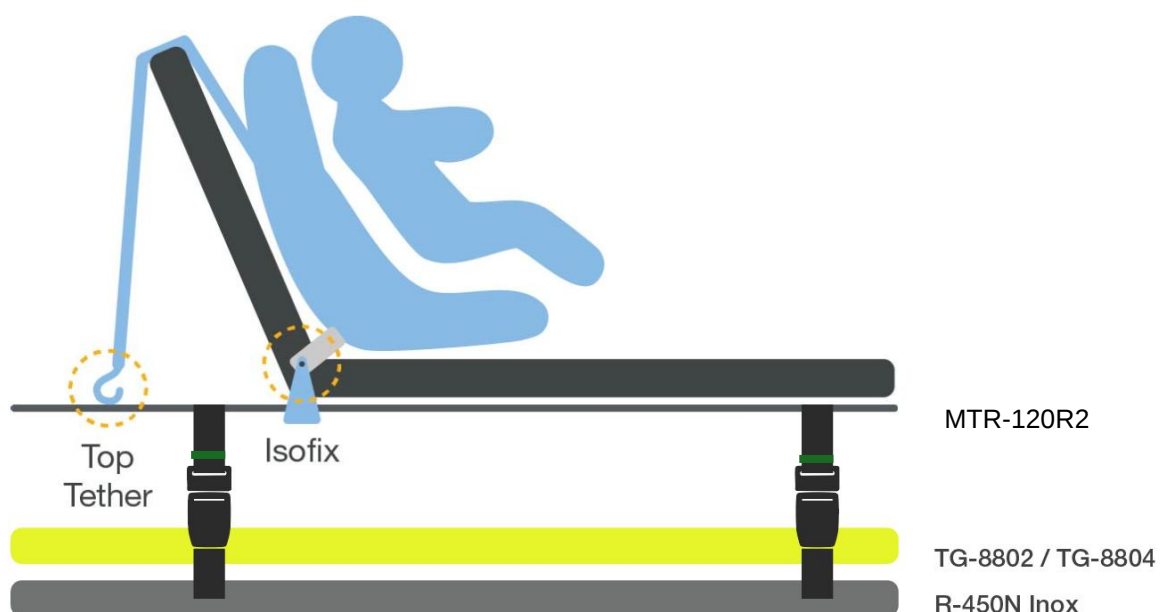


Etichetarea produsului

Abtibilul sistemului de fixare a părții superioare, afișat lângă placa metalică de pe profilul principal:



Pentru sistemul Isofix, sunt 2 etichete per produs, fiind afișate în partea superioară a saltelei, lângă carligele de prindere ale caruciorului.

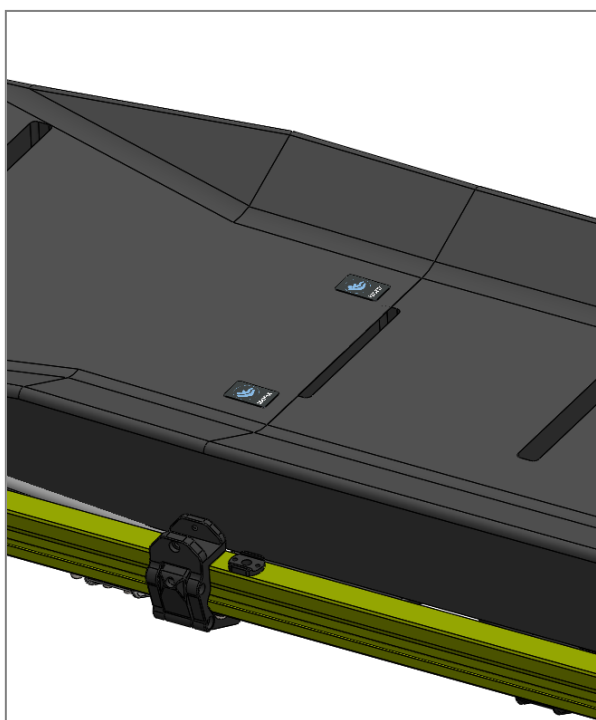



KARTSANA

C/ Narcís Monturiol, 34
08192 Sant Quirze del Vallès
Barcelona (Spain)
TEL. +34 93 715-86-72
info@kartsana.com
www.kartsana.com

Serviciu tehnic

sat@kartsana.com

Va rugam sa contactati serviciul tehnic
pentru orice intrebare sau suspiciuni ati avea.

