



Manual de utilizare RedVac Junior

Sistem de fixare a pacienților pentru transportul în siguranță al copiilor pe cărucioare în ambulanțe

- Sistem de bază cu curele de fixare, Art. No. KF01X07
- Saltea Pediatrică Vacuum mică, Art. No. VKF01PX02
- Saltea Pediatrică Vacuum mare, Art. No. VKF02PX01



Cuprins

Pagina

Introducere	2
• Sistem de bază, Art. No. KF01X07	3
Conectarea plăcii de bază la cărucior	4
Fixarea copilului pe placa de bază	5
Saltea Vacuum Art. No. VK01PX02 și VK02PX01	6
Fixarea copilului pe placă în salteaua Vacuum	7
Curățare și întreținere	8

Introducere

Sistemul standard al căruciorului ambulanței de fixare a pacientului nu este în mod normal proiectat pentru copii cu o înălțime mai mică de 130 cm.

Sistemul RedVac Junior este destinat a fi montat pe cărucioarele de ambulanță pentru a face posibilă transportarea în siguranță a copiilor de toate înălțimile cu o lungime de până la 130 cm și o greutate de maximum 40 kg.

Trebuie îndeplinite următoarele condiții


Înălțimea corpului: min 50 cm

greutatea corporală: min 3,5 kg

Circumferința capului: min 35 cm

Până la vârsta de un an, este obligatorie o saltea Vacuum VKF.

Sistemul constă dintr-o placă de bază, KF01X07, pe care sunt montate curele de fixare a pacientului, precum și curele pentru fixarea plăcii de bază pe căruciorul ambulanței.

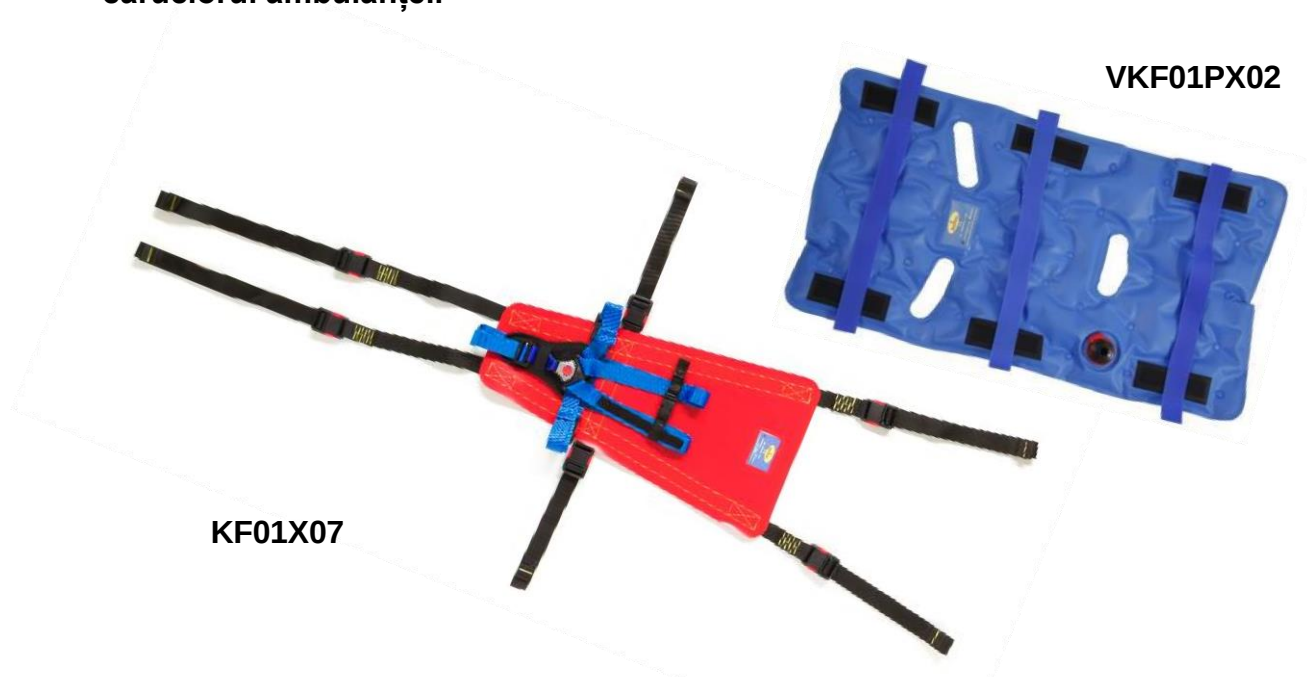

**Sistemul de bază:
Placă de bază
Art. No. KF01X07**



**Placa de bază KF01X07 cu
curele de fixare compuse din:**

- 1** Curele pentru fixarea plăcii de bază la capătul de sus al căruciorului
- 2** Curele de fixare a pacientului pentru fixarea umerilor
- 3** Curea pentru menținerea curelelor de umăr împreună
- 4** Curele pentru fixarea plăcii de bază pe partea stângă și dreaptă a tărgii
- 5** Curele de fixare a pacientului pentru fixarea șoldurilor și a zonei inghinale
- 6** Piesă cu cataramă de siguranță prindere în 3 puncte
- 7** Curele pentru fixarea plăcii de bază la capătul piciorului căruciorului

Fixarea modelului KF01X07 pe cărucior

Conectați curelele la locurile corespunzătoare de pe cadrul căruciorului la capătul capului și picioarelor și pe laterale, închideți cataramele de siguranță și strângeți curelele.

În cazul în care aveți îndoieli cu privire la locul de conectare a curelelor la cărucior, consultați producătorul căruciorului.



Fixarea copilului pe placa de bază

1. Deschideți cataramele și puneți curelele pe laterale



2. Poziționați copilul pe placa de bază



3. Închideți catarama de siguranță în 3 puncte și strângeți curelele



Copil fixat pe modelul KF01X07



SALTEA VACUUM
Art. No. VKF01PX02
Art. No. VKF02PX01



Salteaua Vacuum VKF01PX02 și VKF02PX01 destinată pentru utilizare cu placa de bază KF01X07 compusă din:

- 1** Curele de fixare a pacientului pentru zonele capului, corpului și picioarelor
- 2** Curele pentru a conecta secțiunea capului cu secțiunea corpului
- 3** Fante în zona gâtului pentru curelele de umăr
- 4** Deschidere pentru partea între picioare cu catarama de siguranță în 3 puncte
- 5** Supapă vacuum (de vid)



Fixarea copilului în salteaua Vacuum VKF01PX02 pe placa de bază

1. Desfaceți cataramele și puneți salteaua Vacuum pe placa de bază. Trageți partea inghinală prin orificiul din saltea și curelele de umăr prin fante.

2. Poziționați copilul pe saltea, închideți cataramele.

2. Se mulează ușor salteaua Vacuum (de vid) în jurul copilului și se evacuează aerul până când salteaua susține bine copilul.



Copil fixat pe KF01X07 în salteaua Vacuum VKF01PX02



Curățare/dezinfecție și întreținere:

Sistemul de bază și salteaua Vacuum pot fi curățate cu apă și un detergent.

Trebuie evitată o curățare mecanică extremă care ar putea afecta materialul suprafeței.

Dezinfectați folosind exclusiv dezinfectanți pe bază de alcool (etanol / propanol). Utilizarea altor clase de substanțe poate duce la deteriorarea ireversibilă a suprafeței și a materialului.

Nu utilizați solvenți.

După curățare, produsele trebuie să fie uscate cu grijă.

Depozitarea:

Salteaua Vacuum (cu vid) trebuie depozitată în condiții uscate.

Reutilizare:

Produsul poate fi utilizat din nou dacă materialul nu este deteriorat și dacă funcția sa este păstrată.

Înainte de utilizare, utilizatorul trebuie să verifice dacă produsul este într-o stare corespunzătoare.

Pot fi utilizate numai produse în perfectă stare tehnică și igienică.



KOHLBRAT & BUNZ GMBH
Loretostrasse 4 - 8 A-5550
Radstadt - AUSTRIA



T +43 6452 71930
F +43 6452 719351
info@redvac.com
www.RedVac.com

Subsemnatul **CIUHU BOGDAN CONSTANTIN**,
traducător autorizat cu nr. 7319/2002 certifică exactitatea traducerii cu textul documentului,
redactat în limba **engleză** și vizat de mine.

Traducător Autorizat
CIUHU BOGDAN CONSTANTIN
Spaniolă, Engleză
Aut. M.J. 7319/2002

