



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MANȘETĂ DE PERFUZIE

Trebuie să raportați producătorului și autorității competente din statul membru în care vă aflați orice incident grav care apare în legătură cu dispozitivul medical pe care îl furnizați.

REF

32680



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Fabricat în China



Set de manșete pentru perfuzie

Acest dispozitiv poate fi utilizat ca auxiliar al perfuziei în cabinet și este recomandat să fie utilizat împreună cu punga de perfuzie. În comparație cu metoda tradițională de perfuzie cu presiune furnizată de gravitație, acest dispozitiv poate evita contaminarea aerului înconjurător, deoarece aerul înconjurător nu va intra în contact cu medicamentul lichid. În același timp, paramedicul beneficiază de mai multă comoditate, deoarece nu trebuie să țină setul de perfuzie la un anumit nivel, însoțind pacientul, în special atunci când acesta merge să mănânce, să facă activități în aer liber sau la toaletă.

Dispozitivul este format din manșetă de perfuzie, bulb de umflare, manometru și nod. Vă rugăm să conectați aceste părți înainte de utilizare.

Instrucțiunea de utilizare a acestui dispozitiv

Acest dispozitiv poate asigura presiunea necesară pentru punga de perfuzie, astfel încât să se asigure că medicamentul lichid curge din punga de perfuzie către corpul pacienților.

- Puneți punga de perfuzie în manșonul de perfuzie, iar punga de perfuzie va fi chiar sub plasa transparentă. Puneți manșeta de perfuzie într-o zonă sigură pentru a evita extrudarea sau căderea, fixați punga de perfuzie prin presiunea manșetei de perfuzie;
- Pompați bulbul de umflare pentru a introduce aer în manșeta de umflare. Observați cu atenție manometrul pentru a vă asigura că presiunea atinge media presiunii sistolice și a presiunii diastolice a pacientului;
- Conectați setul de perfuzie de unică folosință cu punga de perfuzie, iar medicamentul lichid va curge în întregul set de perfuzie de unică folosință. Asigurați-vă că nu există bule în acesta și închideți comutatorul de perfuzie. Apoi este gata pentru alte operații obișnuite de perfuzie;
- În timpul perfuziei, presiunea va scădea treptat. Vă rugăm să pompați bulbul de umflare pentru a crește presiunea. Dacă viteza de perfuzie este prea mică sau prea mare, vă rugăm să modificați presiunea din manșeta de perfuzie prin pomparea bulbului pentru umflare sau prin eliberarea supapei de deflație pentru deflație, astfel încât să obțineți viteza de perfuzie dorită;

TERMENI DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția standard B2B Gima de 12 luni.

	Cod produs		Dispozitiv medical
	Numărul lotului		Citiți instrucțiunile de utilizare
	A se păstra într-un loc răcoros și uscat		A se depozita la adăpost de lumina soarelui
	Producător		Data fabricației
	Dispozitiv medical în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745		Conținut sau prezență de latex natural

Subsemnatul CIUHU BOGDAN CONSTANTIN,
traducător autorizat cu nr. 7319/2002 certific exactitatea traducerii cu textul documentului,
redactat în limba *engleză* și vizat de mine.

Traducător Autorizat
CIUHU BOGDAN CONSTANTIN
 Spaniolă - Engleză
 Aut. M.I. 7319/2002