



Alcoolmetru produs de PAL Finland

Instrucțiuni pentru utilizare în siguranță

Cifre esențiale

0-5‰
interval de
măsurare

97,5%
acuratețe

6,3%
precizie



10 – 40 °C
50 – 104 °F

Domeniu de
temperatură



Numai pentru
personal medical



< 3075 m / < 10 745 picioare
Limită utilizare altitudine



Poate fi utilizat pe
avioane comerciale




Numai sânge integral
proaspăt prelevat



Specific EtOH

Ghid pas cu pas pentru testarea alcoolului din sânge


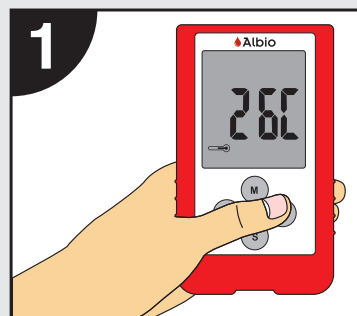




Pentru a verifica temperatura, apăsați butonul “>” (butonul săgeată la dreapta) Temperatura, unitatea de temperatură și simbolul termometrului () vor fi afișate pe ecran timp de 3 secunde și aparatul se va opri automat.

1. Verificați temperatura, dacă este în domeniul de operare. Dacă există o schimbare rapidă >10°C (>18°F), așteptați timp de 10 minute ca sistemul să se stabilizeze

2. Introduceți stripul de testare în aparat. Dacă aparatul se oprește, apăsați butonul M

3. Verificați ca codul din aparat să corespundă cu codul din flaconul cu stripuri de testare

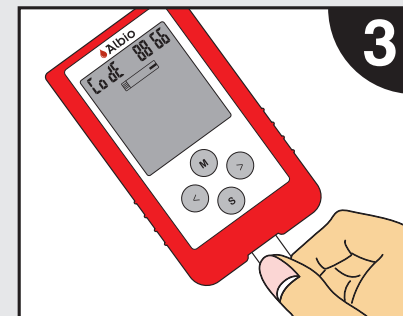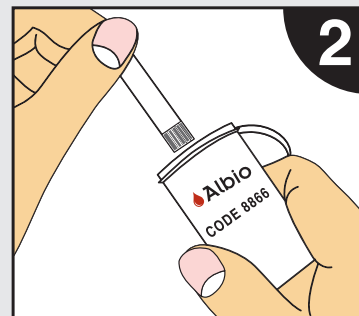


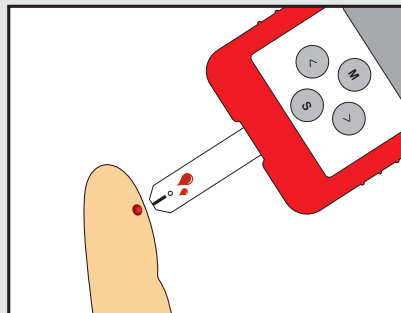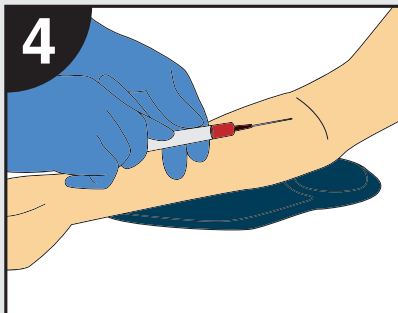

4. Colectați proba de sânge

- Se recomandă șervețele sterile cu NaCl
- Nu folosiți șervețele de curățare cu etanol
- Nu prelevați din aceeași mână cu infuzia
- Colectați din sânge venos/sânge de la vârful degetelor

Nu strângeți degetul

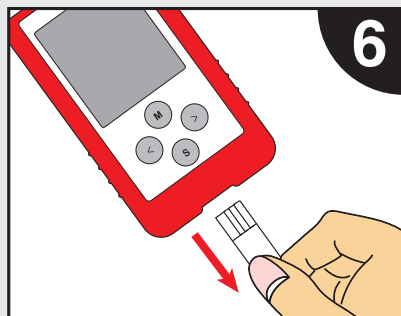

5. Aparatul va emite un bip și va număra 25 de secunde pentru a afișa rezultatul în per-mill (‰)

6. Scoateți stripul de testare și aruncați-l conform regulamentelor locale