





PRODUSE MEDICALE PROFESIONALE

GAROU MILITAR

Toate accidentele grave legate de dispozitivul medical furnizat de noi trebuie raportate producătorului și autorității competente din statul membru în care se află sediul social al societății dumneavoastră.

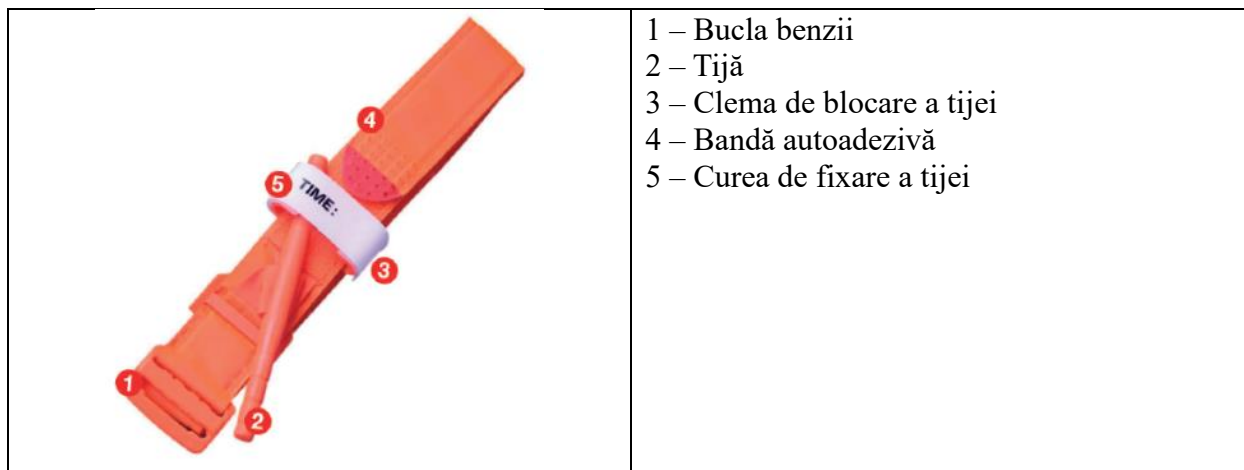

Atenție: Atunci când este aplicat conform instrucțiunilor, acest garou este un dispozitiv sigur și eficient pentru controlul hemoragiilor care pun în pericol viața la nivelul extremităților. Dacă nu sunteți sigur sau nu aveți timp să examinați sursa hemoragiei în funcție de situație, garoul poate fi aplicat eficient peste haine, cât mai sus posibil pe braț sau picior. Garoul nu trebuie aplicat peste obiecte solide aflate sub haine. De îndată ce situația o permite, membrul rănit trebuie evaluat, iar garoul re poziționat la 5-7 cm deasupra leziunii, direct pe piele.

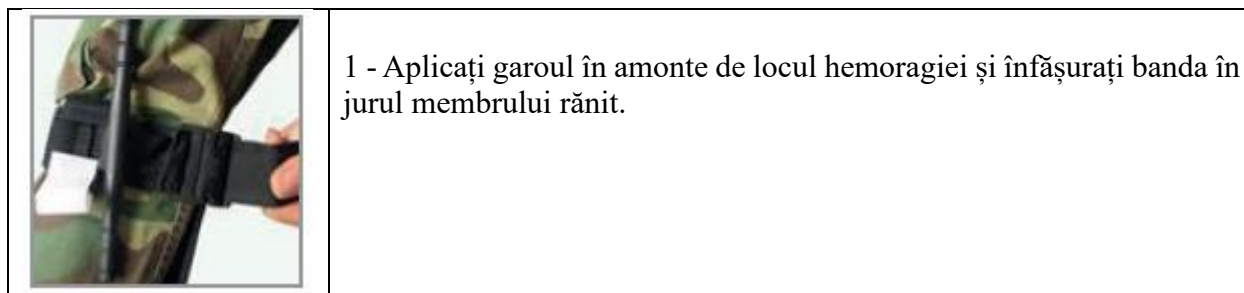

	2 - Strângeți bine banda și fixați-o răsucind-o peste ea însăși.
	3 - Înfășurați banda în jurul membrului, asigurându-vă că aceasta aderă bine.
	4 - Rotiți tija până când hemoragia intensă se oprește.
	5 - Plasați tija în interiorul clemei și blocați-o.
	6 - Lipiți banda peste tijă; pentru capetele mici, continuați să înfășurați banda în jurul capătului și peste tijă.
	7 - Fixați tija și banda cu ajutorul curelei; fixați-o de cârligul opus situat pe clema baretei. Indicați ora aplicării.

 A se feri de lumina soarelui	 A se păstra într-un loc răcoros și uscat.	 Dispozitiv medical
 Atenție: citiți cu atenție instrucțiunile (avertismentele)	 Dispozitiv medical conform cu regulamentul (UE) 2017/745	 Dispozitiv de unică folosință, nu reutilizați
 Codul produsului	 Numărul lotului	 Producătorul
 Data fabricării	 Nesteril	 Identificator unic al dispozitivului
 Consultați instrucțiunile de utilizare	 Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat	

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italia

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Fabricat în China

Subsemnata, **BUMBACEL MONICA**, traducator autorizat pentru limba engleza si franceza, in temeiul autorizatiei nr. 37756, eliberata de Ministerul Justitiei, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat a fost tradus in intregime si ca, prin traducere, in scrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.

