



Pătura auto-încălzire pacient pentru prevenție hipotermie

Pătura atinge temperatura operațională în aproximativ 30 de minute și menține o temperatură medie de 44°C pe o durată de până la 10 ore. Temperatura pielii sub pătură atinge un maximum de 42°C.

- Ajută la prevenirea hipotermiei în perioada peri-operativă
- Ușor și rapid de aplicat
- Ușor de utilizat înainte, în timpul și după operația chirurgicală pentru încălzirea eficientă a pacientului
- Nu necesită echipament suplimentar fiind disponibilă ușor pentru mai mulți pacienți



Instrucțiuni de folosire



1. Desfaceți pachetul utilizând zona pre-tăiată plasată în colțul de sus stânga. Scoateți pătura din pachetul extern protector și expuneți BARRIER® EasyWarm® la aer.



2. Despătureți pătura BARRIER EasyWarm complet având grijă să nu rămână părți împăturite. Când pătura este expusă la aer, ea se încălzește și ajunge la temperatura operațională în aproximativ 30 minute. Pătura menține o temperatură medie de 44°C pe o durată de până la 10 ore. Temperatura pielii sub pătură atinge un maximum de 42°C.



3. Așezați BARRIER EasyWarm cu tampoanele de încălzire în sus. Nu așezați greutate suplimentară deasupra buzunărașelor cu tampoane de încălzire.



4. În timpul perioadei pre- și post operație, și în timpul intervențiilor chirurgicale la mână, brațe și cap, așezați BARRIER EasyWarm pe întreg corpul.




5. Pentru intervenții chirurgicale în zona abdominală joasă și pe extremitățile inferioare, așezați BARRIER EasyWarm peste zona toracică și extremitățile superioare.



6. Pentru intervenții chirurgicale deasupra zonei genitale așezați BARRIER EasyWarm peste partea inferioară a corpului.

Informatii generale

- Nu împăturiți pătura.
- Îndepărtați pătura înainte de proceduri cu raze X sau MRI deoarece buzunărașele cu tampoane de încălzire nu sunt translucide.
- Buzunărașele cu tampoane de încălzire trebuie așezate cu fața în sus.

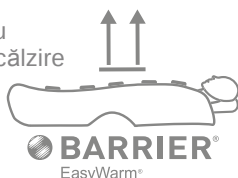

- Se recomandă să se evite contactul direct al pielii în zonele cu vanatai, umflături și degerături. La pacienții cu sensibilitate, reactivitate insuficientă sau lipsa de comunicare, răspunsul pielii trebuie să fie monitorizat periodic, în conformitate cu protocolul spitalului.
- După utilizare, aruncați BARRIER EasyWarm la gunoi. Pătura se poate incinera.
- A se folosi sub supraveghere medicală.

Precauții

- Pătura este un dispozitiv terapeutic activ și trebuie utilizat conform instrucțiunilor pentru a evita posibile răniri termice.
- Nu utilizați pătura în medicina hiperbarică.
- Pătura nu este destinată utilizării în chirurgia pediatrică.

Ref Nr.	Descriere
629900	BARRIER EasyWarm este o pătură cu auto-încălzire: 12 tampoane de încălzire activate la contactul cu aerul (13cmX10cm) integrate pe stratul superior al păturii. Material: mai multe straturi de SMS (polipropilenă). Straturile și buzunărașele cu tampoane de încălzire sunt cusute cu ață din polyester/bumbac. Tampoanele de încălzire sunt realizate din pungi permeabile de aer care conțin cărbune activ, lut, sare, apă și pulbere de fier. Amabalaj: Punga din polimer cu vacuum. Pungile din polimer sunt împachetate în folie cu bule și ambalate în cutii de transport. TRP: 10 buc.