

Saltea vacuum RedVac®

Instrucțiuni de utilizare



Scopul:

Salteaua vacuum RedVac este folosită pentru a fixa și imobiliza pacienții suspecți de a avea fracturi ale coloanei vertebrale și extremități (mâini, picioare) rănite sau rupte. Utilizarea ei este limitată la asistență preclinică și la prima intervenție înainte de internare. Saltelele vacuum RedVac® nu sunt destinate pentru imobilizarea permanentă, așa cum este cazul în utilizarea gipsului. Rănile deschise vor fi sterilizate și tratate înainte de aplicarea saltelei, conform standardelor în vigoare privind tratarea rănilor.

Aplicare:

Salteaua vacuum RedVac este un produs medical care poate fi utilizat numai de către personal medical specializat care a fost instruit și antrenat pentru lucrul cu acest tip de produs. Aplicarea acestuia trebuie făcută în concordanță cu recomandările și instrucțiunile medicale curente, recunoscute.

- Tratarea rănilor deschise și zonelor cutanate neintacte în concordanță cu recomandările curente privind tratamentele aseptice și necesită o acoperire cu material steril.
- Mutarea pacientului va fi efectuată cu atenție folosind echipamente adecvate (de exemplu, targă lopată) cu respectarea recomandărilor curente în domeniu. Pentru a fixa salteaua închideți centurile și strângeți curelele.
- Pentru a evacua aerul din saltea, valvele trebuie să fie închise. Se va avea grijă ca să se fixeze furtunul de la pompa pentru evacuarea aerului în orificiul prevăzut cu valvă al saltelei, astfel încât aerul să poată fi absorbit (evacuat) din saltea.
- Când a fost obținută rigiditatea dorită desfaceți furtunul de evacuare a aerului din valvă.
- Verificați salteaua pentru a vedea dacă aceasta este închisă etanș și asigură confortul necesar pentru pacient.

Curățare, întreținere și dezinfecție:

Salteaua vacuum poate fi curățată cu apă și detergent. Trebuie evitată o curățare mecanică extremă care ar putea deteriora materialul de suprafață.

Dezinfectați exclusiv folosind dezinfectanți aprobați. Când sunt utilizate alte clase de substanțe, acest lucru poate duce la deteriorarea ireversibilă a suprafeței și a materialului. Nu folosiți solvenți.

După curățare, salteaua trebuie să fie uscată cu grijă.

Dezinfectanți aprobați – REDVAC

Aplicație	Denumirea produsului	Furnizor	Inhalanți	Situații
Dezinfectant de suprafață	Descogen liquid	Antiseptika	Compus de peroxid	Conform producătorului
Dezinfectant de suprafață	Incidin Pro	Ecolab	QAV + Fenoxietanol	Conform producătorului
Dezinfectant de suprafață	Incidin liquid	Ecolab	Alcool	Conform producătorului
Dezinfectant de suprafață	Incidin Active	Ecolab	Compus de peroxid	Conform producătorului
Dezinfectant de suprafață	TPH protect	Schülke+	QAV + Amină	Conform producătorului
Dezinfectant de suprafață	Mikrozid AF liquid	Schülke+	Alcool	Conform producătorului
Dezinfectant de suprafață	Acryl Des	Schülke+	QAV – non-alcoolic	Conform producătorului
Dezinfectant de suprafață	Perform	Schülke+	Compus de peroxid	Conform producătorului

Depozitare:

Salteaua vacuum trebuie depozitată în locuri aerisite și uscate.

Reutilizare: Produsul poate fi utilizat din nou dacă materialul nu este deteriorat iar funcțiunile sale sunt intacte. Înainte de reutilizare utilizatorul trebuie să verifice starea corespunzătoare a produsului. Numai produsele în perfectă stare tehnică și igienică pot fi reutilizate.

 Kohlbrat & Bunz GmbH, Loretostrasse 4-8, A-5550 Radstadt / Austria, www.RedVac.com	UDI-DI de bază/ GMN: 9010710RedVac9K
  Utilizați acest dispozitiv medical numai cu accesorii sau piese de schimb aprobate de producător	Instrucțiuni în ediția online curentă 

Conținutul acestor instrucțiuni de utilizare este protejat prin drepturi de autor. Orice utilizare, inclusiv extrase, necesită aprobare scrisă.

Subsemnatul **CIUHU BOGDAN CONSTANTIN.**
traducător autorizat cu nr. 7319/2002 certific exactitatea traducerii cu textul documentului,
redactat în limba **engleză** și vizat de mine.

Traducător Autorizat
CIUHU BOGDAN CONSTANTIN
Spaniola, Engleza
Aut. M.I. 7319/2002