

Model S-240 si Model S-242 Scaun de urgenta



Specificatii*

A		92 cm
B		74 cm
C		53 cm
D		92 cm
E		17 cm
F		53 cm



..... 9 kg



..... 10.4 kg

* Dimensiunile sunt rotunjite la cel mai apropiat numar intreg.

Nota: In acest manual, modelul de scaun S-242 este utilizat pentru a demonstra capabilitatile scaunelor modelul S-242 si S-240.

Important

Modelul de scaun S-240 si model S-242 sunt dispozitive medicale destinate pentru a ajuta pacientul sa fie mutat la o ambulanta, targa sau unitate medicala.

Folositi scaunul in concordanta cu legile si protocoalele din tara unde este utilizat.

Consultati autoritatile in masura sa va dea informatii

Legate de legi si protocoale, si clarificati toate intrebarile inainte de a utiliza scaunul cu un pacient.

Limita de Incarcare

Model S-240



Model S-242



Manual de Utilizare


A. Deschiderea Scaunului



1



2

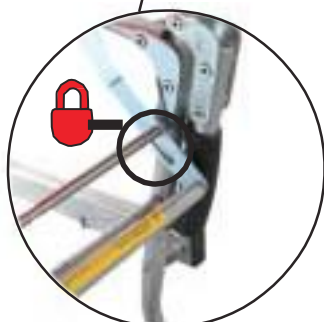

B. Inchiderea Scaunului



1



2



3



C. Ridicarea manerelor din fata**D. Coborarea manerelor din fata**

E. Extinderea manerelor din fata



1



2



F. Retractarea manerelor din fata




1



2

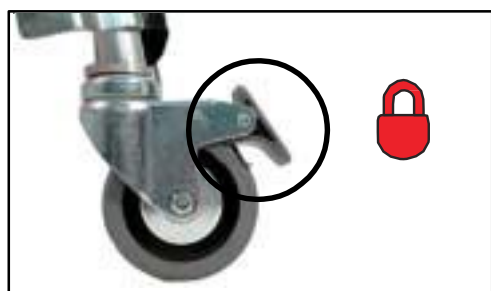

G. Manerele din spate**I. Securizarea pacientului cu centuri****H. Blocarea rotilor - Model S-242****J. Transportul cu scaunul pe scari**

K. Rulare Model S-240**M. Trecerea peste obstacole****L. Rulare Model S-242****⚠ ATENTIE**

Utilizarea incorecta a scaunului poate duce la leziuni. Utilizati scaunul doar in scopul descris in acest manual.

Operatorii neinstruiti pot cauza leziuni sau se pot leza. Doar personalul instruit poate utiliza scaunul.

Operarea improprie poate cauza leziuni. Utilizati scaunul dupa cum este descris aici.

Un pacient neinsotit poate fi lezat. Ramaneti cu pacientul tot timpul.

Un pacient neasigurat cu centuri poate cadea. Utilizati centurile pentru a asigura pacientul.

Persoanele care ajuta si nu sunt instruite pot cauza leziuni sau se pot leza. Utilizati scaunul si instruiti persoanele care ajuta.

Intretinerea improprie poate cauza leziuni. Intretineti scaunul dupa cum este descris in manualul de intretinere primit.

N. Intretinerea scaunului

Echipamentul dumneavoastra Saver necesita intretinere regulata. Tabelul de mai jos indica intervalele minime de intretinere.



	Fiecare Utilizare	La nevoie	Lunar
Dezinfectare	•		
Curatare		•	
Inspectie		•	•
Lubrifiere		•	




	Fiecare Utilizare	La nevoie	Lunar
Dezinfectare	•		
Curatare		•	
Inspectie		•	•

Important




Dezinfectarea scaunului si a centurilor Dezinfectati scaunul si centurile in functie de legile si protocoalele locale.

Curatarea scaunului

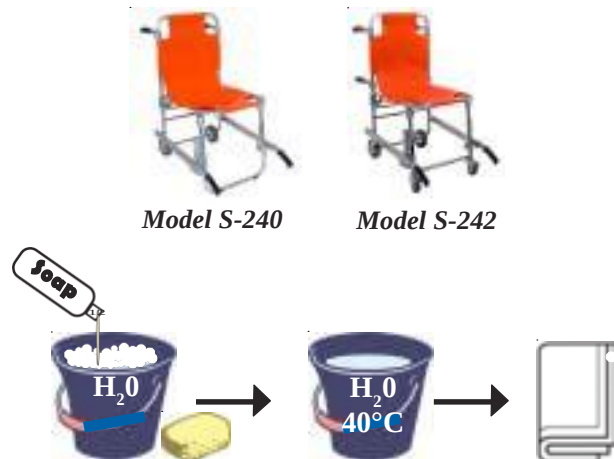

Curatarea centurilor

Utilizati sapun si stergeti usor.

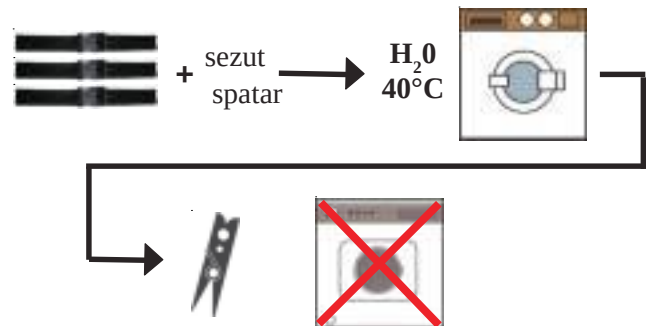

Inspectia scaunului


Inspectati scaunul utilizand urmatorul checklist:

- ☐ Sunt toate componentele?
- ☐ Sunt toate centurile la locul lor?
- ☐ Toate partile mobile functioneaza usor si corect?
- ☐ Sunt centurile instalate corect?
- ☐ Centurile sunt in conditie buna fara taieturi sau margini franjurate?
- ☐ Cataramele centurilor sunt sparte sau au defecte si functioneaza corect?

Daca la inspectie sunt afisate defecte sau uzura excesiva, scoateti scaunul din uz pana cand acesta este reparat.

Lubrifierea scaunului

Utilizati ulei pentru underea suprafetelor inerioare si exterioare ale elementelor pivotante, dupa cum este descris mai jos.

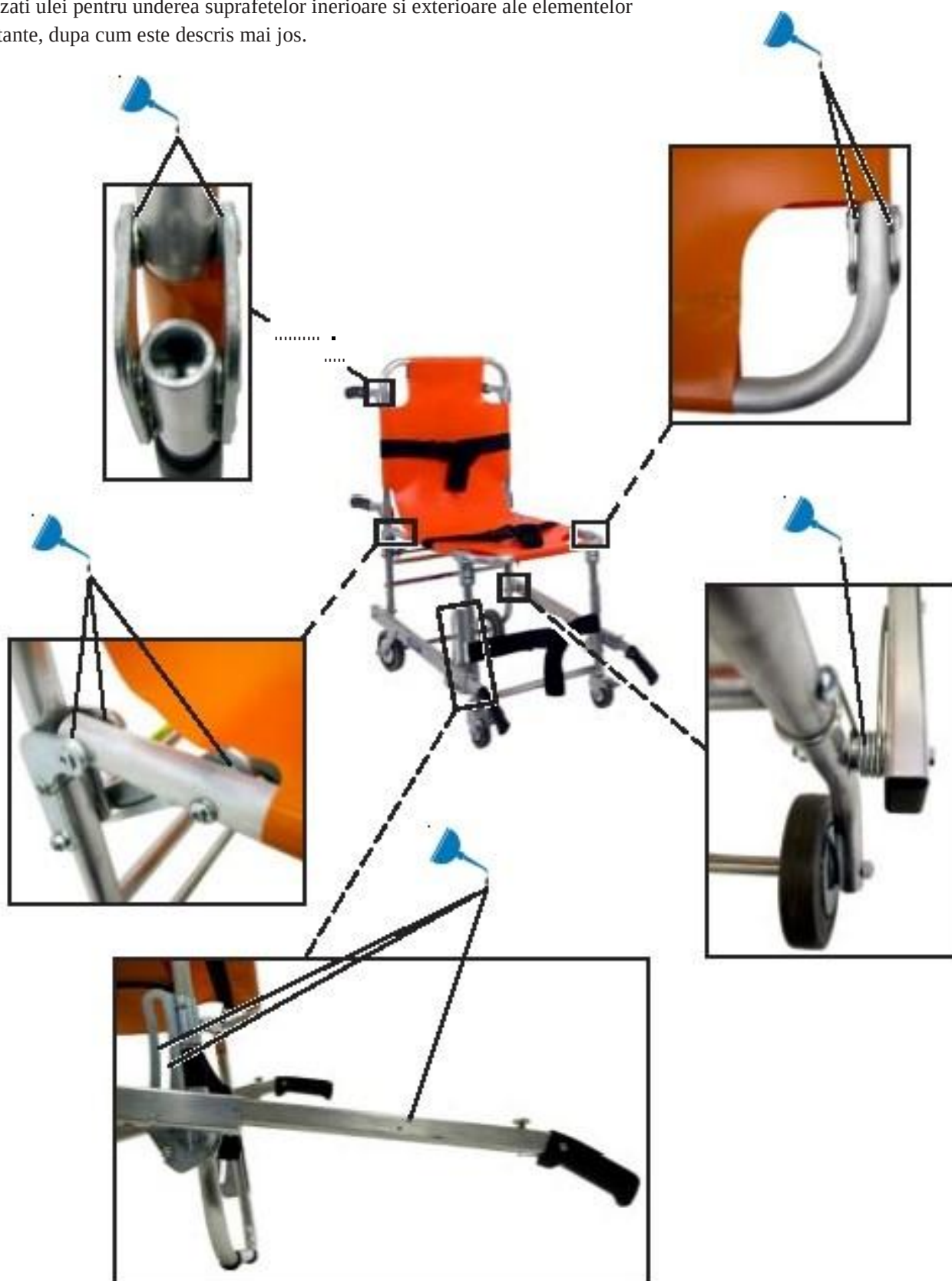

Pentru informatii:
e-mail: contact@s.JVer-ems.com
www.sar-em.com