

TESTUL FUNCȚIONAL

**ZILNIC SAU LA INTRAREA ÎN TURĂ, DUPĂ INTERVENȚIE,
LA CERERE SAU ÎN CAZUL ÎN CARE OBSERVAȚI POSIBILE DEFEȚIUNI**

DESCHIDEȚI MANETA DE BLOCARE ȘI VERIFICAȚI DACĂ BRAȚUL
POATE FI REGLAT PE VERTICALĂ SAU ORIZONTALĂ

2

deltamed
Academy



FUNCȚIONARE CORECTĂ: POATE FI RIDICAT/LĂSAT PE AXUL VERTICAL ȘI
POATE FI ROTIT ORIZONTAL PE AMBELE AXE

REMEDIERE: VERIFICAȚI SĂ NU EXISTE MATERIALE SAU OBIECTE CE ÎMPIEDICĂ
O MIȘCARE CORECTĂ. NU FOLOSIȚI LUBRIFIANT PENTRU ARTICULAȚII!