

TESTUL FUNCȚIONAL

**ZILNIC SAU LA INTRAREA ÎN TURĂ, DUPĂ INTERVENȚIE,
LA CERERE SAU ÎN CAZUL ÎN CARE OBSERVAȚI POSIBILE DEFECTIUNI**

CU MANETA DE BLOCARE DESCHISĂ, APĂSAȚI BUTONUL START TERAPIE



deltamed
Academy



FUNCȚIONARE CORECTĂ: DACĂ NU PORNEȘTE TERAPIA, ESTE ÎN REGULĂ
(SE EVITĂ ASTFEL MODIFICAREA POZIȚIEI ADAPTORULUI DE TERAPIE)

REMEDIERE: CONTACTAȚI COORDONATORUL SERVICIULUI