




Alcoolmetru - ghid rapid -

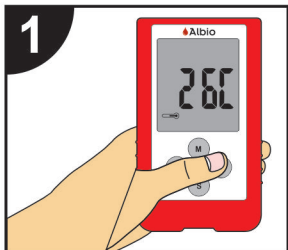



Verificați temperatura apăsând butonul > (trebuie să fie în intervalul 10 - 40°C)

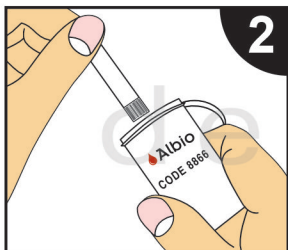

Scoateți un strip de testare

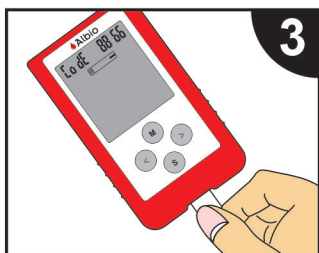


Introduceți strip-ul în alcoolmetru și verificați să corespundă codul de pe afișaj cu cel de pe cutie

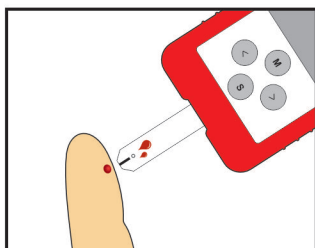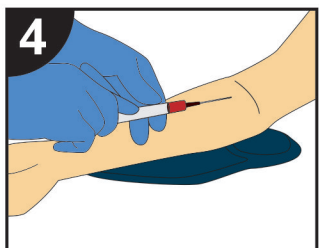

- Colectați proba de sânge
- Nu folosiți servetele cu dezinfectant
- Nu prelevați de la aceeași mână cu infuzia
- Nu strângeți degetul



Dispozitivul va emite un sunet și va număra 25 de secunde pentru a afișa rezultatul

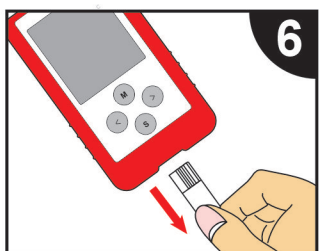

Scoateți stripul de testare și aruncați-l conform procedurilor în vigoare