

ELIBERARE ȘOC (cu ajutorul test loader-ului)

1 - Porniți defibrilatorul pe modul MANUAL

2 - Conectați test loader-ul



3 - Dacă este conectat corect, confirmați

Marcați ca misiune de test?

Da

Nu

4 - Selectați OBLIGATORIU: 50 J (maxim 100 J)

5 - Apăsați tasta "ÎNCĂRCARE"

6 - Țineți apăsat butonul "ȘOC" până la livrare

7 - Așteptați imprimarea completă a confirmării

