

Checklist dispozitiv Corpuls CPR

Nr. crt.	Denumire	Standard	Prezent	Deteriorări vizibile (sistem blocare, contacte electrice, decolorări albe ale adaptorului de terapie, crăpături, deteriorări ale structurii, funcționalitate etc.)
1	Baterie de rezervă din încărcător perete (12V)	1		
2	Geantă de transport	1		
3	Braț	1		
4	Baterie braț	1		
5	Set adaptoare de terapie (1 adaptor scurt, 1 adaptor lung)	1		
6	Card SD	1		
7	Placă Recboard	1		
8	Inel de fixare	1		
9	Set 4 chingi	1		

Test funcțional (se efectuează zilnic sau la intrarea în tură, după intervenție, la cerere sau în cazul constatării unor posibile defecțiuni)

Nr. crt.	Denumire	Funcționare corectă	Remediere probleme posibile
1	Introduceți brațul în soclul plăcii Recboard	Se blochează automat	Verificați să nu existe materiale sau obiecte ce împiedică o cuplare corectă. NU folosiți lubrifiant pentru articulații!
2	Deschideți maneta de blocare și verificați dacă brațul poate fi reglat pe verticală sau orizontală	Poate fi ridicat/lăsat pe axul vertical și poate fi rotit orizontal pe ambele axe	Verificați să nu existe materiale sau obiecte ce împiedică o mișcare corectă. NU folosiți lubrifiant pentru articulații!
3	Verificați dacă bateriile sunt încărcate	Se aprind ledurile verzi (în mod ideal toate 5)	Verificați să fie conectate corect la încărcător
4	Verificați dacă este prezent cardul SD	Prin deschiderea fantei de acces, se observă cardul	Verificați dacă este introdus în poziția corectă
5	Porniți brațul și așteptați să se efectueze autotestarea	La finalul autotestării, butonul de terapie luminează scurt cu o culoare albă și se aude 1 sunet specific	Remediați alarmele indicate
6	Când este pornit brațul, introduceți adaptorul de terapie, deschideți maneta de blocare și aplicați presiune ușoară cu ajutorul mâinii	Când adaptorul este lăsat liber, butonul de terapie are culoare galbenă	Contactați coordonatorul serviciului
		Când adaptorul este apăsat ușor, butonul de terapie are culoare verde	
		Când adaptorul este apăsat mai tare, butonul de terapie are culoare roșie și vibrează	
7	Cu maneta de blocare deschisă, apăsați butonul Start terapie	Dacă nu pornește terapia, este în regulă (se evită astfel modificarea poziției adaptorului de terapie)	Contactați coordonatorul serviciului
8	Opriți brațul de la buton	Nu apar alarme pe afișaj iar după 5 secunde, brațul se închide	Remediați alarmele indicate

Decontaminare (se efectuează după intervenție sau la cerere)

Nr. crt.	Denumire	Funcționare corectă	Remediere probleme posibile
1	Scoateți de la încărcare dispozitivul		
2	Opriți brațul (dacă este pornit)		
3	Decuplați brațul de pe placa Recboard		
4	Îndepărtați bateria		
5	Trageți de adaptorul de terapie pentru a face vizibilă coloana adaptorului		
6	Scoateți adaptorul de terapie		
7	Deschideți maneta de blocare		
8	Îndepărtați/curățați reziduurile grosiere		
9	Dezinfectați folosind materiale de unică folosință (de exemplu șervețele umede impregnate cu dezinfectant sau șervețele uscate împreună cu dezinfectanții aprobați)		
10	Lăsați dezinfectantul să se usuce sau dacă este nevoie, ștergeți cu un material uscat		